

BON DE COMMANDE

☐ Madame ☐ Monsieur

Nom.....

Prénom

Adresse.....

.....

Code postal.....

Ville.....

Téléphone mobile*

Téléphone fixe*

E-mail

*Important pour la livraison
Conformément à la loi Informatique et Liberté N°7817 du 06/01/1978,
je dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations me concernant.

Vagiwell a-t-il été recommandé par un professionnel de santé ?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, nom - CP/ Ville du prescripteur :

.....

Je souhaite commander :

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Vagiwell Premium à 98 € | <input type="checkbox"/> Vagiwell 0 à 28 €** |
| <input type="checkbox"/> Vagiwell Large à 69 € | <input type="checkbox"/> Vagiwell 5LS à 49,80 €** |
| <input type="checkbox"/> Vagiwell Small à 69 € | <input type="checkbox"/> Vagiwell 6 à 49,80 €** |

Possibilités de paiement

PAR INTERNET AVEC PAIEMENT SÉCURISÉ
www.bivea-medical.fr

PAR CHÈQUE À L'ORDRE DE BIVEA

Bon de commande + chèque à retourner à l'adresse :
Bivea Médical 6 rue du Solarium - 33170 Gradignan

PAR TÉLÉPHONE

au 05 57 26 09 00 avec règlement par CB
Depuis l'étranger 00 33 5 57 26 09 00

** Frais de port non inclus de 5,95€
Tarif applicable en France Métropolitaine

QUESTIONS

Les dilateurs Vagiwell peuvent-ils s'utiliser sans prescription médicale et sans accompagnement par un professionnel de santé ?

Les dilateurs vaginaux Vagiwell sont en vente libre et ne nécessitent pas de prescription médicale. Ils peuvent s'utiliser seule chez soi en toute intimité, avec l'aide du conjoint, d'un médecin ou d'un thérapeute.

Toutefois, il est vivement conseillé, pour une plus grande efficacité et afin de rester motivée tout le long du programme, d'être accompagnée par un médecin, une sage femme ou un kinésithérapeute.

Quelle est la différence entre Vagiwell et un sextoy ?

Un dilateur vaginal est un dispositif médical, spécialement conçu pour l'accompagnement thérapeutique et la rééducation sexuelle des femmes.



Pour toute autre information,
parlez-en à votre médecin,
sage-femme, sexologue ou
kinésithérapeute.

GARANTIE ET SERVICE

Chez Bivea nous voulons vous proposer des produits sains, auxquels on croit, respectueux de votre corps et surtout qui vous soulagent au quotidien.

Les dilateurs Vagiwell s'inscrivent dans notre gamme de produits développée selon ces principes.

Satisfait ou remboursé pendant 30 jours.

Des questions ?

N'hésitez pas à nous contacter
par téléphone au **05 57 26 09 00**

Où trouver Vagiwell ?

Sur notre site internet
www.bivea-medical.fr



6 rue du Solarium
33170 Gradignan



Dispositif médical CE

05 57 26 09 00
info@bivea-medical.fr
www.bivea-medical.fr

VAGINISME ET DYSPAREUNIE



Vagiwell

Dilatateurs vaginaux
Dispositifs médicaux



Crédits photos : Bivea et Fotolia - Réalisation : Bivea - Ne pas jeter sur la voie publique - 062025

Qu'est ce qu'un dilatateur vaginal Vagiwell ?

Les Vagiwell sont des dilatateurs vaginaux de tailles, couleurs et diamètres différents.

Par des exercices réguliers, ils permettent à la femme de prendre conscience de ses muscles péri-vaginaux et de rendre peu à peu possible le rapport sexuel. Cela permet de contrôler progressivement la contraction musculaire involontaire pouvant être conditionnée par l'angoisse de la pénétration et la peur de la douleur.

Les dilatateurs vaginaux Vagiwell sont de forme ergonomique et anatomique. Leurs extrémités permettent une introduction tout en douceur.



COMMENT L'UTILISER ?

Avant de procéder à l'insertion du dilatateur dans le vagin, s'isoler dans un endroit calme et relaxant.

Vous avez le choix entre deux postures pour mener les exercices :

• ALLONGÉE

Allongez-vous sur le dos, repliez les genoux et écartez les légèrement.



• DEBOUT

Posez alors l'un de vos pieds sur une chaise ou un autre support surélevé.



Une fois la bonne posture trouvée, c'est à dire la plus confortable, vous allez pouvoir procéder à l'insertion du dilatateur.

Afin de rendre cette insertion plus aisée, nous préconisons d'imprégner l'extrémité du dilatateur d'un peu de lubrifiant à base d'eau fourni avec les dilatateurs Vagiwell. Il est important de procéder avec douceur. En aucun cas l'utilisation de ce dispositif ne doit être douloureuse.

Introduisez le dilatateur avec une légère pression jusqu'à une profondeur confortable pour vous.

Ensuite, laissez le dilatateur quelques minutes dans le vagin. Puis, effectuez des mouvements de rotation.

Fréquence d'utilisation

Les exercices peuvent être répétés 3 à 4 fois par semaine.

Les lots de dilatateurs Vagiwell

Lot de 5 dilatateurs Vagiwell Premium



- Vaginisme : contraction des muscles du vagin
- Dyspareunie : douleurs génitales lors des rapports sexuels

Lot des 3 plus grands dilatateurs Vagiwell Large



- Post-opératoire : descente d'organes ou en cas de cancer
- Pendant et après une radiothérapie/chimiothérapie
- Après des opérations du vagin avec rétrécissement du vagin et cicatrisation

Lot des 3 plus petits dilatateurs Vagiwell Small



- Cicatrisation après une épisiotomie ou une déchirure du périnée

Boîte contenant :
Les dilatateurs Vagiwell
Le lubrifiant Animé 50ml, à base d'eau et d'acide hyaluronique
Un pochon de rangement + une notice

CARACTÉRISTIQUES

- Forme ergonomique et anatomique,
- **Doux au toucher**, texture "moelleuse",
- Dilatateur **légèrement souple**, en silicone médical
- Prise en main facile grâce à l'encoche externe,
- Plusieurs tailles pour une **utilisation progressive**,
- 1 couleur pastel différente pour chaque taille,
- **Dispositif médical** de classe I fabriqué en Allemagne

Taille	Couleur	Diamètre	Longueur d'insertion
Taille 0	Blanc	10/11 mm	80 mm
Taille 1	Bleu	12/14 mm	90 mm
Taille 2	Vert	16/18 mm	100 mm
Taille 3	Violet	20/22 mm	110 mm
Taille 4	Rose	24/26 mm	120 mm
Taille 5	Beige	28/30 mm	130 mm
Taille 5 LS	Blanc	33/36 mm	130 mm
Taille 6	Blanc	39/41 mm	150 mm



Vagiwell 0 En cas de vaginisme
Vagiwell 5LS En cas de lichen scléreux
Vagiwell 6 En cas de vaginoplastie