

Appliquez un lubrifiant à base d'eau sur la baguette et la zone à traiter (vagin ou anus).


Choisissez une position confortable (sur le dos ou sur le côté).

Insérez doucement l'extrémité de la baguette jusqu'à trouver le point sensible.

Appliquez une légère pression sur la zone de contracture. Ce produit s'utilise avec douceur et sans force.

Effectuez de petits mouvements latéraux avec votre genou pour identifier la position qui procure le plus de soulagement.

Une fois cette position trouvée, **maintenez-la pendant 1 à 2 minutes** afin de permettre une relaxation complète du muscle.

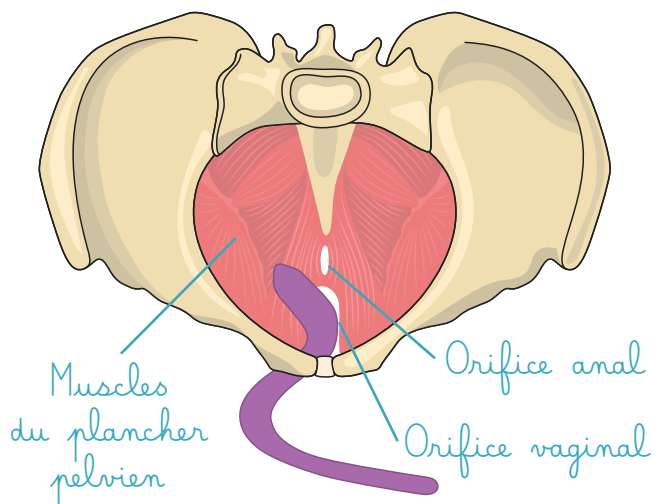

Notre raison d'être est de vous proposer des produits sains, auxquels on croit, respectueux de votre corps et surtout qui vous soulagent au quotidien.

Les baguettes pelviennes s'inscrivent dans notre gamme de produit développée selon ces principes.

Des questions ?

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au **05 57 26 09 00**

Où trouver les baguettes pelviennes

Sur notre site internet
www.bivea-medical.fr



6 rue du Solarium
33170 Gradignan

05 57 26 09 00
info@bivea-medical.fr
www.bivea-medical.fr

Création : Bivea - Impression : Saxoprint - Crédits photos : Bivea - Ne pas jeter sur la voie publique - 032025



Baguettes Pelviennes Intimate Rose


Soulager les douleurs et relâcher
les muscles du plancher pelvien



BAGUETTE PELVIENNE

La baguette pelvienne Intimate Rose offre un moyen doux et efficace de soulager les douleurs et les tensions musculaires du plancher pelvien.

Destinée aux femmes et aux hommes, elle s'utilise par voie vaginale ou rectale et permet d'appliquer une légère pression sur la zone de contracture.

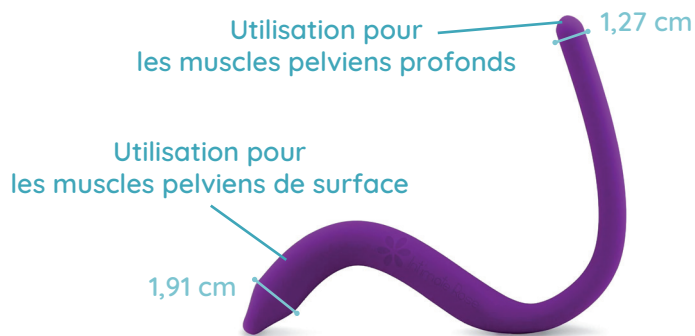

Avantages

- **Confortable** : Fabriquée en silicone médical doux
- **Double utilisation H/F** :
- extrémité fine : voie vaginale et rectale
- extrémité large : voie vaginale
- **Ergonomique** : pour atteindre les points sensibles difficilement accessibles
- **Pratique** : pour une utilisation en autonomie
- **Dispositif médical de classe I**

Caractéristiques

- **Extrémité fine** : diamètre de 1,27 cm
- **Extrémité plus large** : diamètre de 1,91 cm
- **Silicone médical**

GAMME INTIMATE ROSE

3 modèles de baguettes existent pour répondre à vos besoins :



Baguette pelvienne classique :

statique, pour une utilisation simple

49,90€ *

Baguette pelvienne vibrante :

10 fréquences de vibration pour stimuler le flux sanguin et les points de contracture


79,90€ *



Baguette pelvienne chauffante :

idéale pour une thérapie par le froid ou par le chaud

79,90€ *

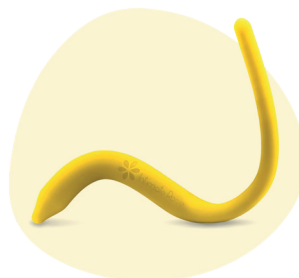

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle est la souplesse de la baguette ?

La baguette n'est pas pliable. Elle conserve sa forme, ce qui est important pour pouvoir atteindre les points sensibles.

Peut-on l'utiliser comme masseur de prostate ?*

La baguette peut être utilisée comme masseur de prostate avec son extrémité la plus fine. Vous pouvez travailler avec un.e kiné spécialisée en uro-gynécologie pour un accompagnement individuel.

A quelle fréquence dois-je utiliser la baguette ?*

- Utilisation quotidienne en entretien
- Utilisation au besoin lorsque vous ressentez une douleur spécifique

Puis-je l'utiliser pour le massage périnéal pendant la grossesse ?*

Si le col de l'utérus est jugé « apte » et que vous êtes autorisée à avoir des rapports sexuels, vous pouvez utiliser la baguette.

Puis-je utiliser la baguette pelvienne seule ?*

Sa forme ergonomique rend la prise en main et la manipulation facile. La baguette s'utilise uniquement seule afin d'exercer la pression adéquate.

* Avant toute utilisation, nous vous recommandons de demander et de suivre les instructions données par votre professionnel de santé.

* Frais de port non inclus
Tarif applicable en France Métropolitaine