

ANABOX® 7 Jours Notice Dispositif médical classe 1

Veuillez lire SVP avant l'utilisation du pilulier nos consignes et indications utiles.

- Laver et rincer chaque pilulier journalier avant la première utilisation. Recommandation: Nettoyer les éléments à l'eau tiède et du produit de vaisselle ou de nettoyage doux. Le passage en lave-vaisselle (température 70°) est possible.
- Nous recommandons aussi le nettoyage avant le remplissage de médicaments si ceux-ci ont été modifiés depuis la dernière utilisation.
- Lors de la prise des médicaments, il faut toujours contrôler la correspondance du jour sur le pilulier.
- Tenir compte d'éventuelles conditions particulières de conservation des médicaments en fonction de la notice d'utilisation. Lors d'incertitudes, renseignez vous auprès de votre pharmacien ou du fabricant du médicament.
- L'utilisation du pilulier ANABOX® par des handicapés mentaux doit s'effectuer sous la responsabilité d'une personne compétente.

moments
de prise



Remplissez les cases selon la prescription en respectant le jour et le moment de la prise.



Pour prélèvement le premier pilulier journalier de la boîte, tirez légèrement du haut vers l'extérieur de la boîte.



Pour le remettre sur le devant, insérez le d'abord par le haut et appuyez sur le bas pour exercer une légère rotation.



La journée finie, repoussez les 6 piluliers vers l'avant et positionnez le à l'arrière.

Fabricant:

[anmed GmbH](http://anmed.com)

Gartenstraße 13 • D-09456 Annaberg-Buchholz

Tel.: +49(0)3733 596300 • Fax: +49(0)3733 596301

E-Mail: anmed@t-online.de

www.anabox.info

Conserver ANABOX® toujours hors de portée des enfants !

Semainier Arc en ciel 7 jours

- Une **couleur par jour** (idéal pour les enfant, les malvoyants, ...)
- Le plus **grand compartiment «matin»** se trouve toujours à gauche . *Veillez à ce que la plus grande case soit en face de «matin»*

- **Remplissage** des compartiments **rapide**



*Enlevez les piluliers journaliers de la boîte et ôtez les couvercles par rotation.
Pour remettre le couvercle, cliquez le après l'avoir superposé à la coque .*



- **Ouverture facile** du journalier : *Pour les prises «matin» à «nuit», poussez le couvercle vers la droite , jusqu'à ce que le compartiment spécifique soit découvert, prélevez le(s) médicament(s) et repoussez le couvercle par la suite dans la position initiale jusqu'à fermeture du pilulier journalier.*

- Le journalier est composé de **5 cases** : Matin, midi, soir, nuit, si besoin. *Pour le prélèvement du compartim «si besoin», déplacez le couvercle vers la gauche. Après prélèvement, déplacez-le de nouveau à droite dans la position initiale.*

- **Lavable en lave-vaisselle** en enlevez les piluliers journaliers de la boîte et ôtez les couvercles.

Distributeur français

Bivea
22 avenue Ferdinand de Lesseps
33610 Canéjan
tél : 05 57 26 09 00
www.anabox.fr info@bivea.com

Fabricant:

anmed GmbH
Gartenstraße 13
D-09456 Annaberg Buchholz
www.anabox.info
Made in Germany

Dispositif médical

ACL : 3401545512282